



EDITION ESPAÑOLA

Struzzo

PARA MOVERSE INDEPENDIENTEMENTE

Este equipo le permite al usuario adoptar y mantener una posición vertical así como moverse tanto en el hogar como en superficies interiores independientemente, sin la ayuda de un cuidador.

ref. code AV 23 2420

Fácil ajuste sin herramientas

Este equipo es apropiado para los usuarios que midan entre 140 y 200 cm y que pesen hasta 140 kg.




PARA FACILITAR LA ACCESSIBILIDAD:

<1> El acceso del equipo se ha hecho más fácil y seguro mediante la alineación del asiento con la posición original de asiento. Durante el traslado de la silla de ruedas al equipo, el asiento, a diferencia del modelo anterior, puede siempre estar en posición horizontal y alinearse al nivel del asiento del usuario mediante el ajuste de altura del equipo.

<2> Las plataformas desplazables, independientes y regulables en profundidad, reducen la distancia entre la persona en silla de ruedas, o simplemente sentada, y la base de la estructura. Esto ayuda a transferir los pies del usuario al equipo. Las plataformas se pueden ajustar incluso cuando el usuario está situado sobre las mismas.

1 - AJUSTE DE LA ALTURA DE LA ESTRUCTURA:

La estructura del soporte central se adapta a la altura del usuario con facilidad y sin esfuerzo, ya que funciona eléctricamente. El ajuste se puede hacer también por el usuario de una manera rápida y fácil, sin necesidad de ayuda externa, incluso cuando el usuario está sobre el equipo. La rodilla, el soporte lateral y el soporte del tronco se ajustan en consecuencia, para mayor seguridad y comodidad del usuario.

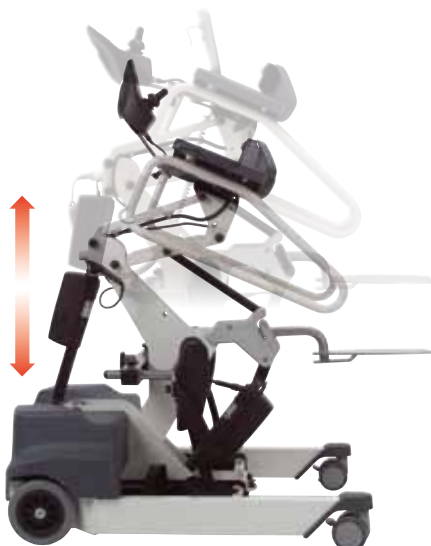

Para mayores informaciones



EDITION ESPAÑOLA

Struzzo


Este tipo de asiento alargado está diseñado para facilitar aún más el desplazamiento del usuario desde su silla de ruedas al equipo.

Además es posible utilizar el accesorio código AC0048.
ref. code AV 23 3420




MONTAJE DE LA FUNDA PARA ASIENTO ALARGADO

<3> El asiento alargado tiene una funda que se sitúa debajo del cojín antidecúbito para que el usuario no tenga que trasladarse desde la silla de ruedas hasta el asiento. Puede ser aconsejable que el usuario sea ayudado para un cuidador si no es bastante fuerte para insertar la funda en el asiento.

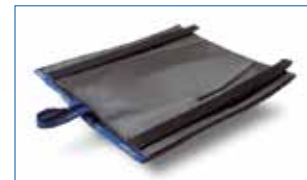

FUNDA PARA ASIENTO ALARGADO puede ser utilizado con el mod. AV 23 3420 para facilitar el acceso desde la silla de ruedas.

DATOS TECNICOS

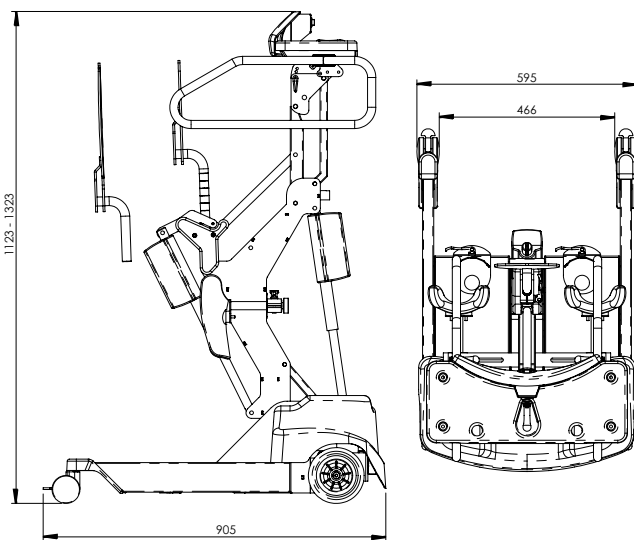

DESCRIPCIÓN	SERIE STRUZZO
Soporte torácico	móvil - en vertical
Levantamiento servo - asistido	eléctrico
Ajuste de la altura	eléctrico
Protección de sobrecarga	electrónico
Advertencia de sobrecarga	acústica
Frenos	en las ruedas posteriores
Velocidad máxima de movimiento	max. 2.5 km/h (ajustable)
Altura desde la base al suelo	31 mm
Escalón máximo	20 mm
Pendiente máxima practicable	2 grados
Autonomía de utilización (levantamiento/transferecia)	normal utilización 3-4 días (2h 30min utilización ininterrumpida en desplazamiento)
Tiempo medio de recarga de la batería	8 horas
Nivel de carga de la batería	en pantalla multicolor sobre el joystick
Regulación velocidad	digital en joystick
Auto - apagado	de serie
Diagnosis fallos y mantenimiento	en la pantalla
Botón de emergencia	de serie
Inhibición del botón de emergencia	de serie

Los modelos STRUZZO están preparados para ser dotados con una serie de accesorios.



CHINESPORT
REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT